

Порядок работы с эндохирургическим инструментом «Коагулирующий электрод игла, отклоняемый».


Коагулирующий электрод-игла используется совместно с маточным манипулятором. С помощью насадок маточного манипулятора контролируется положение матки и выделяется задний свод влагалища.

1. С помощью троакара введите коагулирующий электрод в брюшную полость.


Внимание! Из-за смещенного центра тяжести, рекомендуется жестко держать инструмент в руках, при введении его в брюшную полость.



2. Используя «колесико» на рукоятке, настройте угол необходимого отклонения электрода.

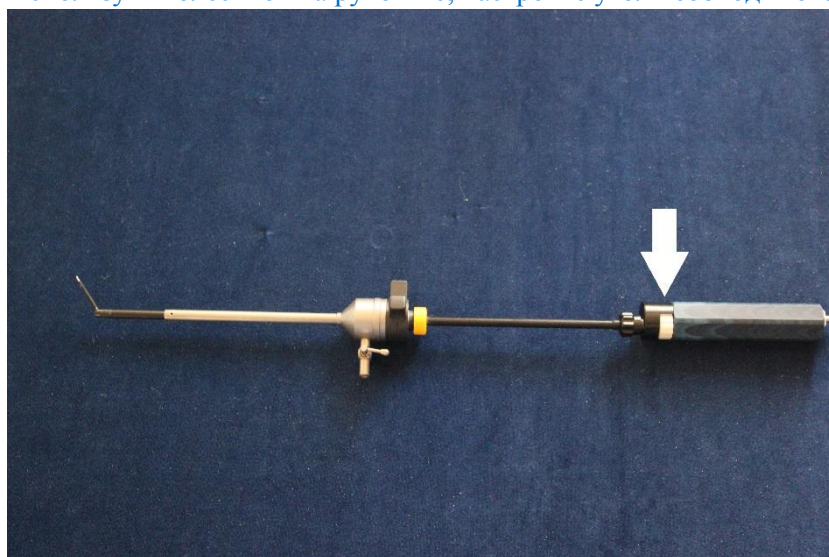

3. Маточный манипулятор вводится ассистентом во влагалище и фиксируется внутри матки, используя пулевочную насадку. Матка поднимается «вверх». С помощью насадки для контурирования, выделяется задний свод влагалища и, используя монополярный отклоняемый электрод, производится ампутация или экстирпация тела матки.

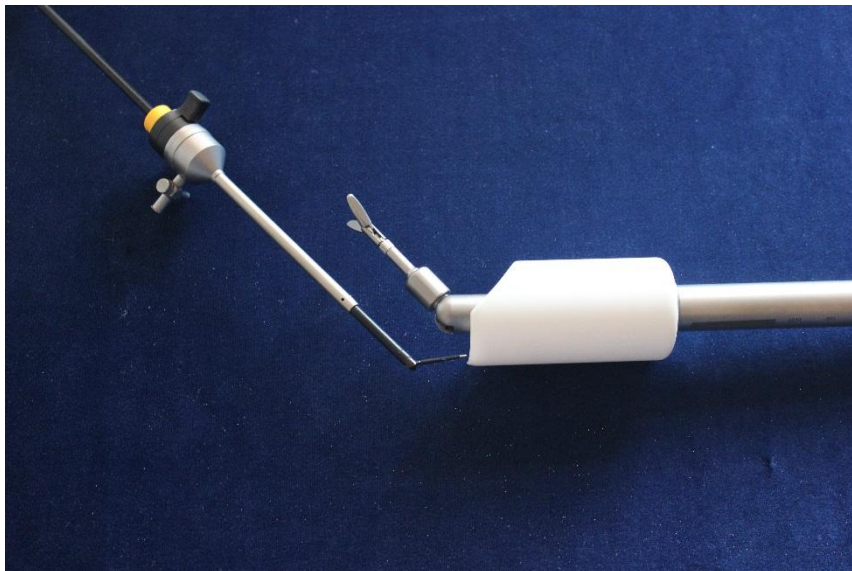

Внимание! Не забывайте, после каждого перемещения насадки для контурирования маточного манипулятора, фиксировать насадку с помощью винта-крепления и только потом производить коагуляцию.

