


Сборка и разборка тубусов операционного гистероскопа Assembly and disassembly of operational hysteroscope



Операционный гистероскоп в собранном виде.
Operational hysteroscope (complete set).

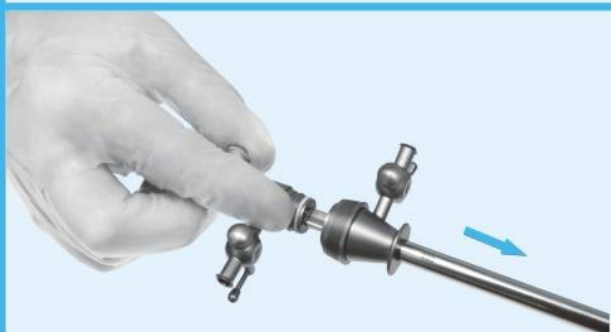

Разборку гистероскопа производим:
нажатием на замок фиксации внешнего тубуса
и движением "вперед" по стрелке.

*Disassembly procedure of hysteroscope:
Pressing the button fixation of hysteroscope's outer
tube and with the help of right-hand rotation.*



Разборка кранов производится путем
откручивания гайки крана против часовой
стрелки и выниманием пробки крана.

*Dismantling of cocks is made by untwisting of a cock
nut counter-clockwise. Take out cock stoppers.*



Инструмент разобран.
Его сборка производится в обратном порядке.

*A view of disassembling instrument.
Assembling procedure is accomplished in a
reverse sequence.*