


Сборка и разборка резектоскопа Assembly and disassembly of resectoscope



Резектоскоп в собранном виде.

Resectoscope (complete set).

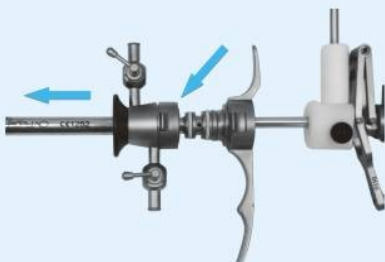


Разборку резектоскопа производим следующим образом:

1. нажатием на выступы замка фиксации внешнего тубуса резектоскопа и движением "вперед" по стрелке. Другой рукой поддерживаем внешний тубус.

Disassembly procedure is accomplished in the following sequence.

Pressing ledges of the lock fixing of an external resectoscopic tube. Take out with the help of right-hand rotation. Other hand supports an external tube.

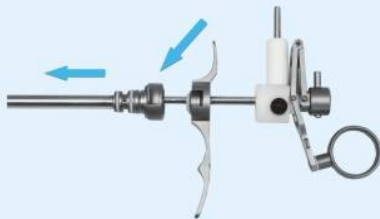


2. нажатием на выступы замка фиксации внутреннего тубуса и движением "вперед" по стрелке.

Pressing a ledge of the lock fixing of internal tube. Take out with the help of right-hand rotation.



Нажатием на кнопку замка электрода и извлечением электрода по стрелке.

Pressing the lock button of electrode. Taking out electrode with the help of right-hand rotation.

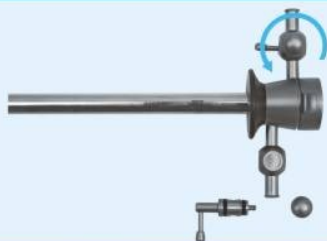

Разборка кранов производится путем откручивания гайки крана по часовой стрелке и выниманием пробки крана.

Dismantling of cocks is made by untwisting of a cock nut counter-clockwise. Take out cock stoppers.



Резектоскоп разобран. Сборка производится в обратном порядке.

Resectoscope is disassembled. Assembling procedure is accomplished in a reverse sequence.