

Сборка и разборка уретротомы Assembly and disassembly of urethrotom




Уретротом в сборе.

Urethrotom (complete set).



Нажатием на выступ снимаем полутубус для катетера Фалея.

Pressing a ledge we remove a semitube for catheter Faleja.

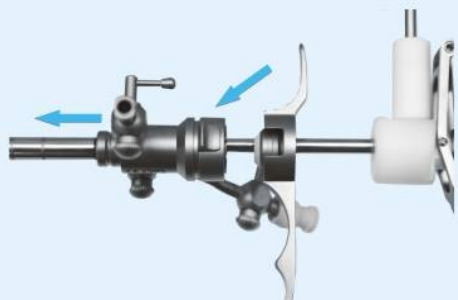

Разборку уретротомы производим:

1. нажатием на выступ замка фиксации ствола уретротомы и движением "вперед" по стрелке.

*Disassembly procedure of urethrotom:
Pressing a ledge of the lock fixing of urethrotom tube. Take out with the help of right-hand rotation.*



2. нажатием на кнопку замка фиксации "холодного ножа" и извлечением "холодного ножа" по стрелке из рабочего элемента.

Pressing the lock button of "a cold knife» fixation and taking out "a cold knife» with the help of right-hand rotation from a working element.



Уретротом разобран. Сборка производится в обратном порядке.

Urethrotom in disassembled. Assembling procedure is accomplished in a reverse sequence.